


Notice de montage De la Joëlette

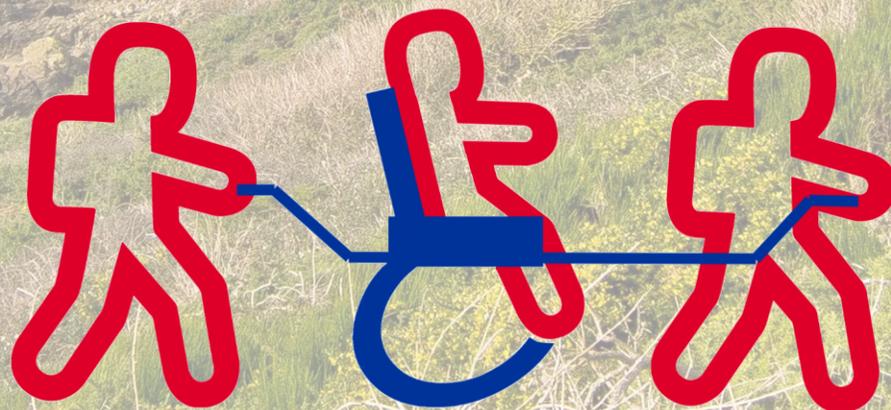



La Joëlette tient dans un coffre de voiture



Les différents éléments de la Joëlette



**Ôter la ceinture.
Débloquer les béquilles arrière puis installer les dans les angles.**



Prendre la roue et son bras oscillant. Enlever la goupille de sécurité et retirer l'axe. Positionner la roue puis remettre l'axe dans son logement. Verrouiller l'axe et remettre la goupille



Fixer la béquille avant, puis verrouiller la béquille avec la goupille de sécurité. Déplier la béquille et verrouiller la avec la bague de sécurité.



Poser la Joëlette sur ses béquilles et vérifier le verrouillage de la béquille avant. L'ensemble tient alors sur son trépied.



Déplier le dossier



Boulon fixe



clé fournie



Engager le boulon de l'accoudoir sur le dossier avec la clé fournie, de même pour l'assise (⚠ 3 positions d'inclinaison) et serrer les 2 boulons puis renouveler l'opération de l'autre côté.



Installer les coussins et déplier l'appui-tête



Régler en hauteur et en profondeur les repose pieds. Installer la personne, fixer les pieds, régler l'appui-tête et boucler la ceinture de sécurité



Déplier et verrouiller les bras avec les goupilles de sécurité



Le harnais d'aide à la traction se fixe sur les mousquetons présents sur les bras avant. Faites un pré réglage des sangles. Il faudra les régler lorsque la Joëlette reposera sur sa roue.



Régler la hauteur des bras arrière avec l'aide de la poignée de gauche.



FFRandonnée Manche

PRATIQUER L'ESPRIT LIBRE